

# NACH DER SKINPEN® PRECISION-BEHANDLUNG ZU BEFOLGENDE RICHTLINIEN

Es ist wichtig, Ihre Haut nach der SkinPen-Behandlung gut hydriert zu halten. Microneedling verursacht eine vorübergehende Zunahme des Wasserverlusts. Deshalb wird es Ihrer Genesung helfen, Ihre Haut hydriert und während dieses Zeitraums geschützt zu halten.

1. Verwenden Sie in den ersten 24 Stunden nach der Behandlung keine anderen Produkte, auch keine Reiniger, auf Ihrer Haut. Werden nach der Behandlung Produkte verwendet, die sich in Zusammenhang mit einer Microneedling-Behandlung nicht bewährt bzw. als sicher erwiesen haben, könnten unerwartete Komplikationen auftreten. Anstatt Ihre Haut zu reinigen, dürfen Sie sie bei Bedarf mit kaltem Wasser abspülen.
2. Wenn Sie den hautberuhigenden RESCUE Calming Complex haben, beginnen Sie, diesen bei Bedarf nach den ersten 24 Stunden aufzutragen, um die Hautreizung zu lindern und die Haut zu beruhigen. RESCUE wurde speziell zum Auftragen nach dem Microneedling entwickelt.
3. Vermeiden Sie es am Tag der Behandlung unbedingt, sich dem Sonnenlicht auszusetzen, da Sie kein Sonnenschutzmittel auftragen dürfen. Sie können 24 Stunden nach der Behandlung wieder Sonnenschutzmittel anwenden. Verzichten Sie für 72 Stunden nach der Behandlung weiterhin möglichst darauf, sich dem Sonnenlicht auszusetzen.
4. Vermeiden Sie für 72 Stunden nach der Behandlung anstrengende sportliche Aktivitäten oder übermäßiges Schwitzen, da übermäßiger Blutfluss und Schweiß zu Beschwerden und Reizungen der behandelten Haut führen können.
5. Vermeiden Sie in der ersten Woche nach der SkinPen Precision-Behandlung die Anwendung von wirkstoffhaltigen Hautpflegeprodukten zum Auftragen, wie z. B. Retinoiden, Vitamin C usw., um das Risiko für eine Hautreizung zu verringern.
6. Vereinbaren Sie Ihren nächsten SkinPen Precision-Termin gemäß den Empfehlungen Ihres Arztes.
7. Wenden Sie sich bei Fragen zur Behandlung an Ihren Arzt.

STEMPEL DES ARZTES, DER DIE SKINPEN®  
PRECISION-BEHANDLUNG DURCHFÜHRT



IHR NÄCHSTER  
SKINPEN® PRECISION-TERMIN:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

**SkinPen**  
BY CROWN AESTHETICS



**MedEnvoy**  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
Niederlande

Beenden Sie die Anwendung von Produkten nach der Behandlung und rufen Sie umgehend Ihren Arzt an, wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihres Ansprechens auf die Behandlung haben oder wenn bei Ihnen Folgendes auftritt: 1. Anzeichen einer Infektion wie beispielsweise eine stärker werdende Hautrötung, zunehmende Wärme oder stärkerer Juckreiz oder die Bildung von Eiter oder 2. Allergische Reaktionen auf das/die Testmaterial/ien. Seltene allergische Reaktionen können in Form einer schweren Kontaktdermatitis (Ausschlag) oder in Form von Juckreiz, Schwellungen oder Atemnot auftreten. Patienten mit Allergien in der Vorgeschichte, mit Asthma und/oder mit Nesselsucht und Juckreiz in der Vorgeschichte haben hierfür ein erhöhtes Risiko. Die Indikationen für SkinPen Precision können je nach Land variieren. Bitte besuchen Sie [www.skinpen.com/international](http://www.skinpen.com/international)