

Unterstützt die natürliche
Erneuerung der Haut



Bringen Sie Ihre

Innere Schönheit

Wieder ans Licht mit SkinPen® Precision Elite

SkinPen
PRECISION ELITE

Wenn Präzision unter die Haut geht



Was ist SkinPen® Precision Elite?

SkinPen® Precision Elite ist ein medizinisch zugelassenes System zur Hautbehandlung, das vorübergehend kleine mikroskopische Kanäle in der Haut erzeugt zur gezielten Stimulation der körpereigenen Kollagenbildung.

Das Verfahren stimuliert die Kollagenbildung und kann zu einer sichtbaren Verbesserung des Hautbildes beitragen.

SkinPen® Precision Elite - unterstützt die natürliche Regeneration Ihrer Haut.

Regen Sie Ihre Kollagenbildung an!



Natürlich inspiriert



Präzision, die den Unterschied macht



Sicher in der Anwendung



Kurze Ausfallzeit – passt in jeden Alltag



Ganzjährig einsetzbar

Geben Sie Ihrer Haut noch heute neue Impulse!

VERWENDUNGSZWECK

Medizinischer Zweck:

Das SkinPen® Precision Elite Microneedling-System ist ein medizinisches Gerät, das zur Behandlung von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen ab 22 Jahren bestimmt ist.

Ästhetische Zwecke:

Das SkinPen® Precision Elite Microneedling-System soll auch das kosmetische Erscheinungsbild von feinen Linien, Falten, Dehnungsstreifen, Operationsnarben, vergrößerten Poren und Pigmentstörungen (Dyschromie) verbessern.

Intelligente Hautpflege mit Microneedling

Wie es funktioniert:

Warum ist Kollagen so wichtig für eine schöne Haut?

Kollagen ist ein wichtiges Strukturprotein unserer Haut. Man kann es sich wie ein stabiles Gerüst vorstellen, das der Haut Festigkeit, Spannkraft und ein glattes Erscheinungsbild verleiht.

Mit zunehmendem Alter produziert unser Körper jedoch immer weniger Kollagen.

Weiterhin spielt Kollagen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Narben, zum Beispiel Aknenarben oder nach Operationen. Wenn die Haut Signale nicht richtig sendet oder Pigmentunterschiede bestehen, kann es zu Dyschromie (Hyper- oder Hypopigmentierung) kommen. SkinPen® Precision Elite kann helfen, das Hautbild optisch zu verbessern.





Regt die natürliche Kollagenbildung an – für ein sichtbar verbessertes Hautbild

30 Minuten Präzision für eine gezielte Kollagenstimulation

Was Sie erwarten können

Vor der Behandlung

Die Haut wird vom Behandler sanft gereinigt. Zur Steigerung des Behandlungskomforts kann eine Betäubungscreme aufgetragen werden.

Direkte Sonneneinstrahlung sowie Sonnenbrand sollten vermieden werden. Zudem empfiehlt es sich, mindestens 24 Stunden vor der Behandlung auf die Anwendung topischer Retinoide zu verzichten.

Während der Behandlung

Nachdem die betäubende Creme ihre Wirkung entfaltet hat, führt der Behandler SkinPen® Precision Elite vorsichtig über das Behandlungsareal. Die feinen Nadeln erzeugen dabei zahlreiche kontrollierte Mikrokanäle in der Haut. Dies kann als leichter Druck oder sanftes Vibrieren wahrgenommen werden und ist in der Regel mit geringem Unbehagen verbunden.

Diese Mikrokanäle regen die natürliche Wundheilungskaskade der Haut an und fördern die Neubildung von Kollagen. Die Behandlung inkl. Hals dauert etwa 30 Minuten.

Nach der Behandlung

In der Regel tritt eine leichte Rötung auf, vergleichbar mit einem milden Sonnenbrand. Weitere vorübergehende Reaktionen können Trockenheit, Spannungsgefühl oder leichtes Peeling der Haut sein. Diese Erscheinungen klingen üblicherweise innerhalb von 24 bis 72 Stunden ab.

Zur Beruhigung der Haut wird ein kühlendes Hydrogel aufgetragen, das den Heilungsprozess unterstützt und den Komfort nach der Behandlung fördert.

Je nach individuellem Hautzustand und Behandlungsziel können mehrere Sitzungen erforderlich sein. Auch zur Erhaltung der Ergebnisse können Auffrischungsbehandlungen sinnvoll sein. Bitte befolgen Sie stets die Nachsorgehinweise Ihres Behandlers.

Ein neues Kapitel für Ihre Haut.

Aknenarben



Vorher



Nachher

Frau
Behandlungen: 6


Photos courtesy of: Cathy A. Presnick,
Licensed Aesthetician; A Perfect Complexion,
LLC, Melbourne, FL

SkinPen® Precision Elite ist klinisch auf Sicherheit geprüft. Es ist das erste von der FDA zugelassene Gerät und Verfahren der Klasse II, das die CE-Kennzeichnung trägt und durch mehr als 90 unabhängige Validierungsstudien bestätigt wurde:


*Data on file. Eine vollständige Zusammenfassung der klinischen Studie der FDA und Informationen zur Verwendung des SkinPen® Precision Elite-Mikronadelgeräts finden Sie unter [skinpen.com/international](https://www.skinpen.com/international)

SkinPen® Precision Elite – Aktivierung natürlicher Regenerationsprozesse

Feine Linien & Falten – Gesicht und Hals

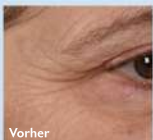

Vorher

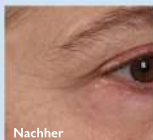

Nachher

Frau
Behandlungen: 4

Photos courtesy of: SkinPen®
Precision Elite clinical trial*



Vorher



Nachher

Frau
Behandlungen: 1

Photos courtesy of: BMED Training
Centre, Ukraine

Vergrößerte Poren



Vorher




Nachher


Frau
Behandlung: 1

Photos courtesy of: The Luxe Estie,
Detroit, MI

Pigmentstörungen

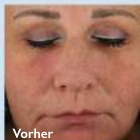

Vorher

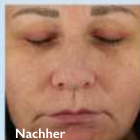

Nachher

Frau
Behandlungen: 4

Photos courtesy of: Rosenpark
Research, Dr. Sonja Sattler

SkinPen® Precision Elite Präzision, die wirkt

Chirurgische Narben



Brachioplastik-Narbe 6 Wochen postoperativ
vor der ersten Microneedling-Behandlung



Brachioplastik-Narbe 8 Wochen nach der
dritten Behandlung

Photos courtesy of: Claytor, R.
Brannon M.D.; Sheek, Casey Gene
D.O.; Chopra, Vinod M.D.
Microneedling Outcomes in Early
Postsurgical Scars. Plastic and
Reconstructive Surgery: September
2022 - Volume 150 - Issue 3 - p
557e-561e doi:
10.1097/PRS.00000000000009466

SkinPen® Precision Elite ist klinisch geprüft, sicher und wirksam. Es ist das erste FDA-zugelassene Gerät der Klasse II und Verfahren, das CE-gezeichnet ist und durch mehr als 90 unabhängige Validierungsstudien gestützt wird.

*Data on file. Für eine vollständige Zusammenfassung der FDA-Studie sowie Informationen zur Anwendung des SkinPen® Precision Elite Microneedling-Geräts besuchen Sie bitte: [skinpen.com/international](https://www.skinpen.com/international)

Mit über 5 Millionen weltweit ausgelieferten Kits unterstützt SkinPen® ästhetische Behandlungen in Praxen rund um den Globus.

VOGUE

THE
AESTHETIC GUIDE

BuzzFeed

Forbes

Modern
Aesthetics

NEWBEAUTY

american spa



RUSH

POPSUGAR.

DUJOUR

NYLON

GOOD
HOUSEKEEPING

COSMOPOLITAN

Real Daily



Fragen Sie noch heute nach SkinPen® Precision Elite.
Besuchen Sie www.skinpende.com, um zu erfahren, wie
Sie glatte und gesunde Haut unterstützen können.

Referenz: Daten liegen vor aus einer klinischen Studie zu Aknenarben, Crown Aesthetics SkinPen® Precision Elite. Geplanter Verwendungszweck – FDA-Zulassung: In den USA ist das SkinPen® Precision Elite-System ein Microneedling-Gerät mit Zubehör, das zur Behandlung eingesetzt wird, um das Erscheinungsbild von Falten, Narben und Aknenarben bei Fitzpatrick-Hauttypen I-IV zu verbessern und das Erscheinungsbild von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen aller Fitzpatrick-Hauttypen ab 22 Jahren zu verbessern. Indikationen und Behandlungsbereiche für SkinPen® Precision Elite können je nach Land variieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte skinpen.com/international

© 2026 Crown Aesthetics | crownaesthetics.com | SkinPen US-patentierter Kartusche: 10.667.830 B2